

Instrukcja użycia testu Anaplasma Ab/Ehrlichia Ab



Linia napełnienia próbki (czarna linia) : 1 kropla (10 μ l)

1

Dozowanie próbki



1 kropla próbki

Nie przekraczaj ilości dozowanej próbki!

2

Absorbcja



Poczekaj do całkowitego wchłonięcia się materiału badanego

3

Dodanie buforu



2 krople buforu

Dadaj bufor po wchłonięciu się materiału badanego.



4

Odczyt

00:05:00-00:10:00



+



Odczytaj wynik między 5 i 10 minutą

-



5

Wyniki nieprawidłowe



Nieprawidłowe wyniki

Nie odczytuj wyniku po upływie 10 minut

