

FeIV/FIV IC

1. Wyjmij test z opakowania i umieść na płaskiej powierzchni. Jednorazową pipetką odmierzyć 1 kroplę surowicy / osocza lub 1 kroplę krwi pełnej do obu okienek oznaczonych literą „S”.



2. Trzymając pionowo buteleczkę z buforem dodaj 2 krople do obu okien oznaczonych literą „S”.



3. Odczekaj 10 minut, aby odczytać wyniki. Wyniki uzyskane po 15 minutach należy traktować jako nieprawidłowe.



4. Interpretacja wyników.



Uwaga

Opakowanie w którym znajdują się pojedyncze testy należy otwierać tylko bezpośrednio przed użyciem. Umieść kasetkę na płaskiej powierzchni. Trzymaj pipetę w pozycji pionowej, aby krople łatwo spadały.