

GIARDIA-IC



1. Pobierz próbkę kału. Włóż próbkę kału do probówki z buforem. Dobrze wstrząśnij i umieść probówkę w pozycji pionowej.



2. Po sedymentacji pobierz supernatant za pomocą dołączonej do zestawu jednorazowej pipetki.



3. Dodaj 3-4 krople supernatantu do okienka oznaczonego literą „S”.



4. Inkubuj przez 5-10 minut
5. Odczytaj wyniki. Wyniki uzyskane po 15 minutach należy traktować jako nieprawidłowe.



Uwaga

Opakowanie w którym znajdują się pojedyncze testy należy otwierać tylko bezpośrednio przed użyciem. Umieść kasetkę na płaskiej powierzchni. Trzymaj pipetę w pozycji pionowej, aby krople łatwo spadały.