

## PARVO/GIARDIA/CORONA Ag

1. Pobierz próbkę kału. Włóż próbkę kału do probówki z buforem. Dobrze wstrząśnij i umieść probówkę w pozycji pionowej.
2. Po sedymacji pobierz supernatant za pomocą dołączonej do zestawu jednorazowej pipetki.
3. Dodaj 3-4 krople supernatantu do każdego z trzech okienek oznaczonych literą „S”.
4. Inkubuj przez 5-10 minut
5. Odczytaj wyniki. Wyniki uzyskane po 15 minutach należy traktować jako nieprawidłowe.



### Uwaga

Opakowanie w którym znajdują się pojedyncze testy należy otwierać tylko bezpośrednio przed użyciem. Umieść kasetkę na płaskiej powierzchni. Trzymaj pipetę w pozycji pionowej, aby krople łatwo spadały.